

My Invisalign™ アプリ インビザライン™ バーチャル・ケア ユーザーガイド



今すぐ
My Invisalign™ アプリをダウンロード



My Invisalign™ アプリの「インビザライン™ バーチャル・ケア」

患者様はMy Invisalign™ アプリを使ってインビザライン™ バーチャル・ケアを利用することができます。

インビザライン™ バーチャル・ケアをご利用いただくことで、ドクターは患者様からMy Invisalign™ アプリで送信された治療の経過写真を確認することができ、次の診察予約までの間、患者様のインビザライン® 治療の経過をリモートで確認することができます。

患者様は、My Invisalign™ アプリを使用してドクターに写真を送信し、フィードバックを受け取ることができます※1。また、写真と合わせてコメントを送信したり、ドクターからのメッセージに返信することも可能です※2。

My Invisalign™ アプリで「インビザライン™ バーチャル・ケア」を使用する

ステップ 1：My Invisalign™ アプリを設定

- My Invisalign™ アプリをダウンロード
- アカウントを登録・設定



01

アカウントを作成して、利用規約に同意します。



02

アライナーバッグに記載のQRコードをスキャン※1または直接入力します。



03

アカウント情報を入力して、PINコードを設定します。



04

治療計画に沿ってアライナーの設定と通知を設定します。



05

アライナーを交換するタイミングで写真を撮影してドクターに送信します。

※1 アライナーをまだ受け取っていない場合は、「アライナーを受け取っていますか？」の画面で「いいえ」を選択してMy Invisalign™ アプリのアカウントを作成してください。アライナーを受け取った後、アプリの「マイケア」にアクセスしてバーチャル・ケアの機能をご利用いただけます。

※2 システムの稼働状況により、コメントを付けた写真の送信やドクターからのコメントへの返信ができない場合があります。

ステップ 2：My Invisalign™ アプリの「マイケア」からドクターに写真を送信します



01

アプリのリマインダー通知を受け取ったら、次のアライナーに交換する前に経過写真を撮影してドクターに送信します。



02

「写真を撮る」を選択します。インビザライン・レンズまたはチークリトラクターのどちらかを選択し、現在装着しているアライナーのステージ番号を確認します。



03

説明動画を見て、AIガイドに沿って写真を11枚撮影します。



04

撮影した写真11枚とコメント（任意）を送信します。



写真撮影のヒント



インビザライン・レンズを使用する

- インビザライン・レンズは、治療経過の確認に必要な歯がはっきりと確認できる写真の撮影に役立ちます。



インビザライン・レンズの組み立て方

ステップ 1：フレームをレンズに取り付けます。

ステップ 2：フレームをスライダーに取り付けます。


ステップ 3：スマートフォンをスライダーの取り付け位置の片側に合わせ、スライダーのグリップを動かしてスライダーがスマートフォンにぴったり合うように調整します。（注：カメラがレンズの中心にくるようにします）。



インビザライン・レンズの組み立て方

※インビザライン・レンズの各パーツとスマートフォンがしっかり取り付けられていることをご確認ください。

※インビザライン・レンズの組み立て、スマートフォンの取り付け、取り外しを行う際には、高い場所を避け、台の上などで行ってください。

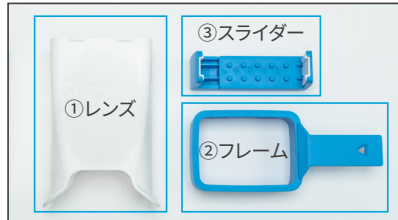

インビザライン・レンズは3つのパーツで構成されます。




説明動画を見る

初めて写真を撮影する時は、写真の説明動画を参考に撮影してください。




インビザライン・レンズを使用した写真の撮影方法

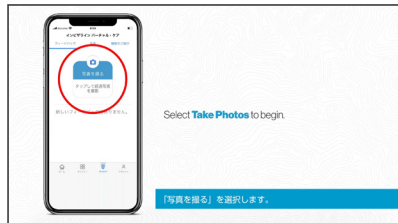

撮影方法

インビザライン・レンズのアプリのガイダンスに従って写真を撮影します。

- 口の中にレンズを入れます。
- アプリのガイダンスに従って、歯の写真を撮影します。

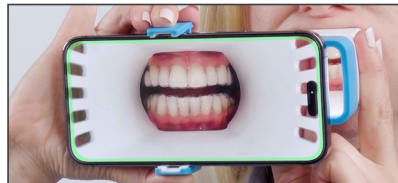

ステップ3：My Invisalign™ アプリでドクターからのフィードバックを受け取る

写真を送信した後、My Invisalign™ アプリに下記の2種類のフィードバックのいずれかが送信されます。

順調です：



治療が順調に進んでいる場合は、「順調です」の通知メッセージが送信されます。

指示コメント：



治療に関するドクターからの指示コメントが届きます。

治療の進捗状況に応じて、ドクターがアラライナーステージや装着状況の変更など、治療の調整（変更）を行う場合があります。新しいアラライナーの交換スケジュールなど、変更された内容は、「アラライナーの設定変更を了承する」をタップすることで、アプリに自動的に反映されます。

ドクターは必要に応じてZoomアプリを使用したバーチャル診察を設定する場合があります。ドクターから送信されるバーチャル診察の予約メールの中に、Zoomアプリのダウンロードリンクが記載されています。事前にアプリをダウンロードして、予約時間になったらリンクをクリックして参加してください。

メモ：My Invisalign™ アプリの通知を有効にして、写真の送信やアラライナー交換などの通知を受け取りましょう

My Invisalign™ アプリ内の他のツールも活用して、インビザライン矯正を順調に進めましょう。



ホーム

「アラライナー取り外しタイマー」

アラライナーの装着時間を記録し、ドクターに自動的に報告します。



ギャラリー

「スマイル・ギャラリー」

ご家族やご友人に治療の進捗の写真を共有できます。



アカウント（設定）

「カレンダー」

アラライナー交換日や次回の診察予約など、予定を確認・追加します。



アカウント（サポート）

「アラライナーご使用とお手入れ方法」

アラライナーのお手入れ方法をご参照ください。

販売名：インビザライン・レンズ 届出番号：13B2X10280000021

align™

© 2024 Align Technology, Inc. All rights reserved. Align, Invisalign, iTero, exocad, Viveraなどは、Align Technology, Inc.またはその子会社もしくは関連会社の商標および/またはサービスマークであり、米国および/またはその他の国において登録されています。224617 Rev A

 **invisalign®**
Transforming smiles, changing lives.